

Descubra el método anticonceptivo que ha estado buscando

Altamente confiable.

Prácticamente sin complicaciones.

No contiene hormonas.

Compruebe usted misma porqué el anticonceptivo intrauterino (intrauterine contraceptive, IUC) ParaGard® es el método anticonceptivo que se adapta a su vida.

- **La anticoncepción total que necesita.** Un 99.4% de efectividad, sin necesidad de tener que recordar tomar una píldora, cambiar un parche o colocar un anillo.
- **Sin hormonas.** A diferencia de la píldora, el parche o el anillo, que funcionan liberando hormonas en el cuerpo, ParaGard® le permite tener su período normal.
 - **Una gran elección** si prefiere no tomar hormonas o no puede tomarlas por cuestiones de salud.
 - **Una gran elección** si no desea tener efectos secundarios, como aumento de peso, cambios en el estado de ánimo o disminución del deseo sexual.
- **Es flexible.** Use ParaGard® el tiempo que usted y su profesional de atención médica elijan: 2 años, 5 años, incluso hasta 10 años.
- **Es a largo plazo pero fácilmente reversible.** Es tan efectivo como una ligadura de trompas, pero le permite cambiar de opinión. Puede pedirle a su profesional de atención médica que retire el ParaGard® en cualquier momento.
- **No presenta complicaciones.** No debe adaptar ningún régimen anticonceptivo a sus horarios, una simple autorevisión mensual es suficiente.
- **Es seguro.** ParaGard® ha sido utilizado durante más de 20 años por millones de mujeres.
- **Es económico.** Si planea usar un método anticonceptivo durante, por lo menos, 2 años, un IUC es la opción más económica disponible.

ParaGard® es una simple pieza en forma de T de un plástico suave y ultra flexible envuelto en cobre, diseñada para que se adapte cómodamente al útero. Su profesional de atención médica puede colocarle el ParaGard® durante una visita regular al consultorio.

ParaGard®
T 380A
intrauterine copper contraceptive



¿Es ParaGard® apropiado para usted?

- Prefiero no tomar hormonas o no puedo tomarlas por cuestiones de salud.
- Deseo un método anticonceptivo altamente efectivo en el cual no tenga que pensar todos los días o todas las semanas.
- Deseo un método anticonceptivo que sea fácilmente reversible.
- Deseo un método anticonceptivo a largo plazo, pero no permanente.
- Deseo un método anticonceptivo que sea seguro de usar cuando estoy amamantando.

Si usted se identifica con estas preferencias, comuníquese con su profesional de atención médica para consultarle acerca de ParaGard®.

Para obtener más información, visítenos en www.paragard.com o llame al 1•877•ParaGard (727•2427).

Preguntas y respuestas breves

P ¿Cuándo comienza a actuar?

R De inmediato, tan pronto como su profesional de atención médica lo coloque.

P ¿Representa algún inconveniente tener cobre dentro de mi cuerpo?

R No. ParaGard® no aumenta el nivel de cobre presente naturalmente en su cuerpo. De hecho, la cantidad de cobre que ParaGard® libera diariamente es menor que la presente en los alimentos que usted ingiere en un día promedio.

P ¿Lo sentiré? ¿Lo sentirá mi pareja?

R No. Ha sido diseñado para adaptarse cómodamente. Ni usted ni su pareja lo sentirán. Además, ParaGard® no interfiere con los tampones.

P ¿Puedo usar ParaGard® si estoy amamantando?

R Sí. A diferencia de otros métodos, no contiene hormonas. De hecho, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (American College of Obstetricians and Gynecologists) lo recomienda como una opción de anticoncepción para las madres en período de lactancia.

P ¿Qué diferencia hay, en cuanto al costo, entre ParaGard® y otros métodos anticonceptivos?

R Si planea usar un método anticonceptivo durante, por lo menos, 2 años, un IUC es la opción más económica disponible, debido a que paga sólo una vez, cuando se coloca el dispositivo.

P ¿Dónde puedo obtener ParaGard®?

R Puede solicitarlo a su profesional de atención médica. O bien, puede pedir su ParaGard® usted misma, siempre que sepa el número de teléfono o fax de su profesional de atención médica. Se enviará al consultorio de su profesional de atención médica. Para pedir su ParaGard® por teléfono, llame al 1•877•ParaGard (727•2427).

P ¿Cómo pago el ParaGard®?

R Muchas compañías de seguro de salud cubren el ParaGard®. Comuníquese con su proveedor para saber si cubre el ParaGard®. Si es así, consulte qué valor cubre. Si su proveedor no cubre el ParaGard®, o si no tiene seguro, el Plan de Pago para Pacientes de ParaGard® le permite pagar el ParaGard® en 12 pagos mensuales. Llame al 1•877•ParaGard® (727•2427) para obtener más información.

ParaGard® T 380A
intrauterine copper contraceptive

Información de seguridad importante

ParaGard® no ofrece protección contra el VIH/SIDA ni otras enfermedades de transmisión sexual.

No debe usar ParaGard® si en la actualidad tiene enfermedad inflamatoria pélvica (Pelvic Inflammatory Disease, PID) aguda o su comportamiento actual sugiere que tiene un alto riesgo de contraer PID. ParaGard® tampoco es apropiado para mujeres que puedan estar embarazadas, tengan un útero cuya forma interna sea anormal, hayan tenido una infección uterina posterior al embarazo o a un aborto en los últimos 3 meses, tengan cáncer del útero o del cuello uterino, tengan sangrado vaginal sin motivo aparente, tengan una infección en el cuello uterino, tengan alergia a algún componente de ParaGard®, tengan enfermedad de Wilson o que ya tengan un anticonceptivo intrauterino en el útero.

Los efectos secundarios más comunes de ParaGard® son hipermenorrea y períodos menstruales más largos durante algunos meses después de la colocación; algunas mujeres tienen sangrado intermenstrual. En la mayoría de las mujeres, este efecto secundario desaparece luego de unos meses. No obstante, si su flujo menstrual es abundante o prolongado, comuníquese con su profesional de atención médica. También debe comunicarse de inmediato con su profesional de atención médica si no tiene un período, debido a que puede estar embarazada.

Algunas posibles complicaciones graves que se han asociado con los anticonceptivos intrauterinos, incluido ParaGard®, son PID, perforación del útero, expulsión (cuando el anticonceptivo se cae completa o parcialmente fuera del útero) y dificultad para retirarlo (cuando el anticonceptivo queda trabado en el útero y, en ocasiones, se requiere cirugía para retirarlo).

Consulte la información del producto en www.paragard.com.



Duramed Pharmaceuticals, Inc.
Subsidiary of Barr Pharmaceuticals, Inc.
Pomona, New York 10970